

担架式簡易浴槽 ユーラック 使用説明書

使用方法を守り、正しくお使い下さい。

有限会社 東海技研

静岡県御前崎市池新田 3198-2

Tel:0537-86-8770 / Fax:0537-86-8934

①



←左図の様に入浴者側のパイプを上に乗っても痛くないように、マットの下に入れる。

→入浴者を頭の位置を合わせてシート上に移動させる。



②



1. 入浴される方の腕と胸の上でしっかり組ませて、両ひざを深く立てる。



入浴される方を横向きにしてシートを敷く。

2. 右手で入浴される方のひざを手前に倒す。次に、左手で入浴される方の左の肩を手前に引き上げるようにする。(同時にはしない)

③



二人で持ち上げ入浴場所に移動する。

※力の強い人が頭側を持って下さい。
※スタンドはあらかじめ入浴場所に設置しておいて下さい。

④



たるまない様に図の様に、マジックバンドで固定して下さい。
排水ホースを浴槽シートの排水栓に取り付け、ホースの先を排水させる所にセットする。

⑤

シャワーを自分の手に当て温度を確かめていただき、足の方からお湯をかけてください。肩までお湯が入ったら2～3分入浴していただき清拭剤をお湯に溶かし、タオルや入浴手袋でやさしく洗ってください。

⑥



入浴後、浴槽シートの排水栓を抜き、水を全部出します。タオルで体と浴槽シートを拭きます。
排水ホースを外したら、体が冷えないよう乾いたバスタオルやタオルケット等で体を包んでから寝室へ移動させて下さい。

⑦

二人で持ち、寝室まで移動する。再びパイプをマットの下に入れ布団に移す。

⚠ 注意



洗髪する時には、まわりに水気がかからないように洗髪用枕をご利用下さい。