



簡易浴槽ユーラック ご使用上の注意事項

- 使用後の保管場所は日光の当たる場所や高温になるところ、湿気の多いところは避け風通しの良い暗所にて保管ください。
- キャスター部分には水が掛からないように排水ホースを使用してください。濡れてしまうと駆動不良やサビの原因となります。
- ユーラックを移動させる際には必ず「抜け防止リング」を装着してください。
- ご使用前にはグリップにゆるみがないか必ずご確認ください。
ゆるんで回ってしまう場合は市販の接着剤(セメダイン 3000 ゴールド 推奨)を流し込んで固定させてください。
- ユーラックに関する詳しい使用方法は、右記 QR コードまたは
浴槽 ユーラック で検索してください。



ユーラック HP