



介助者ひとりでも簡単! ラクラク! ゆったり入浴!!

移動式簡易浴槽ユーラック

体を横向きにさせて浴槽シートを敷くだけで、後は簡単! 楽々入浴。
介助者一人でも簡単に、しかも楽に入浴させる事が可能です。
だから気兼ね無く家族にも頼めます。



商品名 移動式簡易浴槽ユーラック

価格 110,000円(税抜)

【仕様】

サイズ

幅64 × 長さ 200 × 高さ85 (cm)
※上記は身長165cm前後の方に最適なサイズです。
お客様の身長に合わせて、サイズ変更可能です。

重量

15kg

浴槽カラー

オフホワイト

本体カラー

ブラウン

付属品

高さ調整ベルト 空気入れ

送料

送料別途



介助者一人でもベッドの上で入浴者の下に浴槽シートを敷くだけで後は力は要りません。



85cmの高さがあり、洗髪や体を洗う時にも介助者の腰に負担がかかりません。



浴槽はエアークッションが体にやさしく保温性にも優れています。



仰向けに寝ている状態で入浴するので、体全体がお湯に浸かっているから心臓への負担は少ないです。



介助者も一人で行うことができ、お湯の量も少量で済むので経済的です。



園芸用ホースや排水ホースを長くすれば、お風呂まで遠い方でもご利用いただけます。入浴場所を問わず使用でき、便利です。

! ご利用のベッドの仕様を必ずご確認ください。

1 上下移動式ベッドである

ベッドの高さを上下できる機能がありますか?

HPで使用方法を動画で紹介



2 移動式簡易浴槽ユーラックのキャスターをベッドの両サイドに入れる場合

ユーラックのキャスターが入るようにベッドの足の幅が**170cm以下**であるか?

ベッドの足の幅を確認!!



(標準サイズの場合)

3 移動式簡易浴槽ユーラックのキャスターをベッドの下から入れる場合

ユーラックのキャスターが入るように床からのベッドのすき間が**13cm以上**であるか?

床からのすき間の高さを確認!!



※13cm以下(16cmより低いタイプ)もあります。

移動式簡易浴槽ユーラックは助成金対象商品です。負担なくご購入いただけます。

ホームページにて動画で詳しくご覧いただけます。



浴槽 ユーラック

検索

お問い合わせ・ご購入は…

有限会社 東海技研

〒437-1612 静岡県御前崎市池新田3198-2

TEL : 0537-86-8770

FAX : 0537-86-8934

http://www.u-luck.jp/